


1

Vul de afdruklepel gelijktijdig met het omspuiten van de afdruckstift(en), -kap en eventueel van de (licht vochtig) geprepareerde randlocaties.

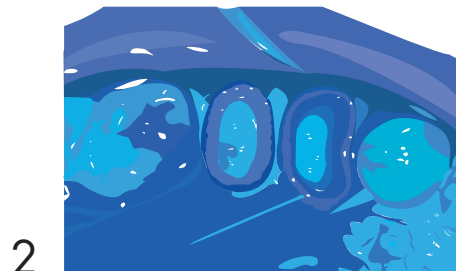

2

Tijdens de intra-orale uithardingstijd de afdruklepel blijven vasthouden (minimale druk) tot de volledige uitharding van het Identium afdruckmateriaal.



3

Eventueel losschroeven van de afdruckstift(en) en voorzichtige monduitname.

Voordelen

- Reuk- en smaakneutraal.
- Meer zekerheid dankzij 380 ml Jumbo cartridge.
- Unieke vloeï- en hydrofiele eigenschappen.
- Nauwkeurige 3-dimensionale stabiliteit.
- Directe eindhardheid van A 60
- Eenvoudige monduitname.
- Meerdere keren uit te gieten.

Kroon en brugwerk - Identium Medium
Identium afdruckmateriaal is speciaal ontwikkeld voor o.a. al uw kroon- en brugwerk.

Bestelcode

- 14716 Identium Medium Intro, 380 ml cpl
- 14717 Identium Medium Rell, 2 x 380 ml
- 14204 Identium adhesief, 10 ml
- 17900 Dynamische mengtips blauw, 45 stuks

Optioneel

- 13701 Identium Light, 2 x 50 ml (incl. intra-orale & meng-tips)
- 17240 Mengtips MB 4.2 geel, 100 stuks
- 17222 Intra-orale tips geel, 96 stuks

