


00:00 min. 00:40 sec. 03:30 min.


Verwerkingstijd

Intra-orale uithardingsstijd



Monduitname

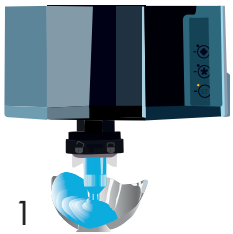

1

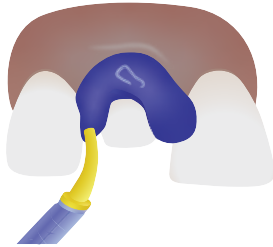

2

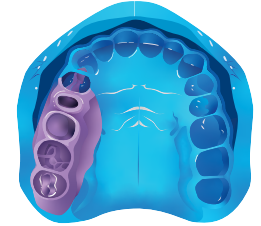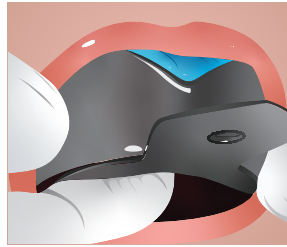

3

Vul de afdruklepel gelijktijdig met het omspuiten van de geprepareerde (licht vochtige) randlocaties. Plaats de afdruklepel binnen 0:40 sec.

Tijdens de intra-orale uithardingsstijd de afdruklepel blijven vasthouden (minimale druk) tot de volledige uitharding van het Identium afdruk materiaal.

Voorzichtige monduitname, controle afdruk en desinfecteren.

Voordelen

- Reuk- en smaakneutraal.
- Meer zekerheid dankzij 380 ml Jumbo cartridge.
- Unieke vloeï- en hydroele eigenschappen.
- Nauwkeurige 3 -dimensionale stabiliteit.
- Eenvoudige monduitname.
- Meerdere keren uit te gieten.

Implants

Optimale scheurweerstand dankzij directe eindhardheid van A 60.

Ref. Product

- 14726 Identium Heavy Fast Intro, 380 + 50 ml cpl
- 14727 Identium Heavy Fast Rell, 2 x 380 ml
- 14204 Identium adhesief, 10 ml
- 17900 Dynamische mengtips blauw, 45 stuks

- 13711 Identium Light Fast, 2 x 50 ml (incl. intra-orale & meng-tips)
- 17240 Mengtips MB 4.2 geel, 100 stuks
- 17222 Intra-orale tips geel, 96 stuks

