

ADHESIVE REMOVER



De nieuwe **ADHESIVE REMOVER** is DE oplossing voor het eenvoudig verwijderen van lastige adhesiefresten uit afdrucklepels. Geschikt voor alle afdruk- en reliningmaterialen van Kettenbach Dental.

DIVERSE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN



Eenvoudig losmaken van siliconeafdrukken uit metalen lepels

Bevochtigt het grensvlak tussen afdruckmateriaal en afdrucklepel met Adhesive Remover. Verwijder het afdruckmateriaal uit de afdrucklepel. Het losmaken kan door gebruik van een metalen instrument (spatel) en opnieuw bevochtigen van het grensvlak vergemakkelijkt worden.



Moeiteloos verwijderen van adhesiefresten uit metalen lepels

Bestrijk de verontreinigde afdrucklepel royaal met Adhesive Remover en veeg vervolgens af met een droge doek. Bij sterke vervuiling kan het nodig zijn dit een aantal keren te doen. Het inmasseren van de Adhesive Remover met het penseel maakt het reinigen gemakkelijker.



De perfecte aanvulling op Mucopren® Soft!

Uitstekend geschikt voor het losmaken van zacht blijvende relininglagen van prothesebases. Geen affrezen meer nodig.

Bevochtigt het grensvlak tussen reliningmateriaal en prothesebasis met Adhesive Remover. Als er te weinig hechtvlak voor de Adhesive Remover is, kan een inkeping in het reliningmateriaal nuttig zijn. Verwijder het reliningmateriaal van de prothesebasis. Het losmaken kan door gebruik van een metalen instrument (spatel) en opnieuw bevochtigen van het grensvlak vergemakkelijkt worden. Voordat de prothesebasis van een nieuwe relining kan worden voorzien, moet het oppervlak opgeruwd, afgespoeld en gedroogd worden.